

Servicemanual ElectroDrive Lipo Smart

Para/Tetra

Inkl. Vedlikeholdsbeskrivelse

1 Vedlikehold

Sjekk trykket på kjørehjulet før hver kjøring. Det skal være 3 bar.

Pass på at det elektriske tilkoblingene har en sikker kontakt.

Før kjøring, test også effektiviteten til bremsene.

Mekaniske deler:

I prinsippet må alle bolter til ikke-bevegelige deler av rammen bli strammet skikkelig (unbrakonøkkel 6mm).

Boltene S1L og S1R til tverrstangen må bli ekstra godt strammet for å hindre en glidende bevegelse på tverrøret.

Elektriske deler:

Sjekk jevnlig alle kabeltilkoblinger for synlige skader.

Pass på en sikker kontakt for tilkoblingen.

Bytt ut skadede tilkoblinger.

Periodisk veksling for vedlikehold

De følgende inspeksjonene bør bli gjort hver 500 km og minimum to ganger i året:

1. Undersøk dekkene for ytre skader. Mål dekkpresset og pump det opp til 3 bar (sjekk maksimum dekktrykk på dekket) hvis det er nødvendig. Bytt ut slitte dekk.
2. Sjekk eikene for skader. Stram opp løse eiker.
3. Sjekk akselmutteren og skruetilkoblingen til momentarmen. Stram om nødvendig.
4. Sjekk slitasjen på bremsepedalene. Sjekk skruetilkoblingen på bremsesylinderen og stram opp om nødvendig. Sjekk bremserøret for lekkasjetetthet.
5. Sjekk alle bolter på U-rammen og stram opp om nødvendig.
6. Sjekk den automatiske catch i fri bevegelse og rengjør den.
7. Open og lukk klemmene mens du sjekker den i fri bevegelse. Olje vinkelskruen lett.

Råd for bruk av Lipo Smart Para/ Tetra nær sjøen (salt luft)

Ved bruk eller lagring av Lipo Lomo ved sjøen må du tenke på den salte luften. For å unngå korrosjon på rammen og på komponentene (motor, bremses etc.) rengjør den med spesialrensemiddel.

Bruk en svamp og varmt vann for å fjerne saltforekomster
Pass på at vannet ikke entrer kontrollen eller kontrollelementet.



Order number:



873026-0

2. Bytte av dekk

Før bytte av dekk, koble fra begge tilkoblingene ved å kutte kabelstroppene åpne. Sett det sammen etter byttet og fest med kabelstroppene igjen.

3. Vedlikehold av batteri

Lad batteri etter hver tur hvis batteriet viser 70% eller mindre.

Ved 70% eller mere kan batteriet lades.

Hvis sykkelen ikke benyttes over tid, lad opp batteriet minimum en gang pr. måned.

Hvis kaldt vær (mindre enn 5°C) ta batteriet inn i romtemperatur.

Er du i tvil - lad. Batteriet kan ikke overlades.

Rengjør batteriet for skitt og smuss. Sjekk ladeplugg og batterikontakt.

I en ladeprosess, vær spesielt oppmerksom på evt. feilkoder.

(Hvis feilkoder - se bruksanvisning).

