



1 Åpne kartongen, ta ut den øvre isoporen. Legg kartongen ned. Rull ut din Eloflex av kartongen (se bildet).



2 Ta av posen og dekkeplasten. Gjenvinn den via plastavfall.



3 Slå opp din Eloflex ved å dra ryggen oppt og bakover. Lås haken under ryggen (se bruksanvisningen).



4 Monter den løse kabelen på valgfri ledig kontakt på batteriet. Skru til låseringen ordentlig på kontakten.



5 Klipp bort transportbeskyttelsen på begge sider med en saks.




6 Fjern transportbeskyttelsen på den bakre buen over motorene ved å klippe den av med en avbitertang.



7 Ta joysticken ut av vesken under setet.




8 Monter joysticken på valgfri side. Dra til festeskruen slik at joysticken ikke kan beveges.

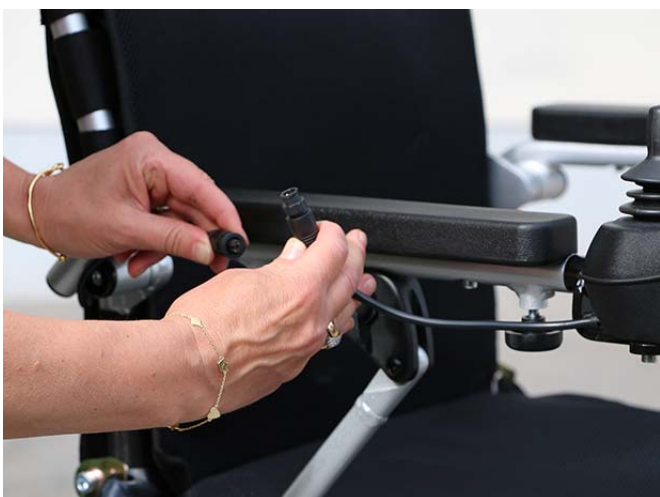

9 Sett forsiktig sammen kontaktene på joystick-kabeln etter å ha kontrollert styresporene. Bøy ikke stiften! Skru sammen kontaktens låseringer.



10 Pump bakhjulene på modellene L-Plus og M-Plus til 2,5 kg lufttrykk.

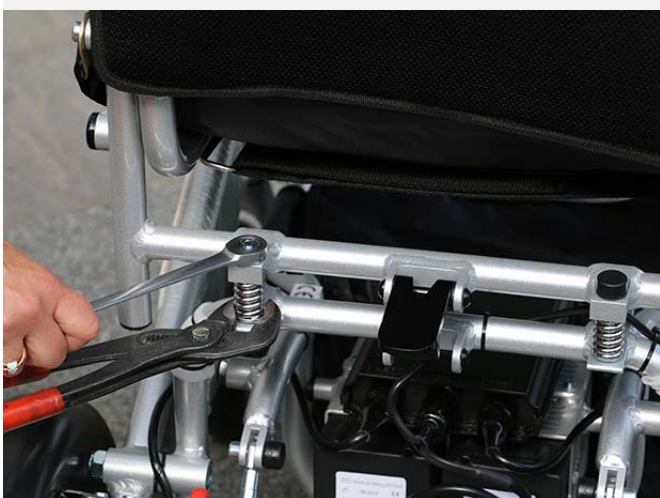

11 Hvis låsehaken opplevs som treg eller vanskelig å åpne/lukke kan den justeres ved at de to fjærene dras til. Se bilde.



12 Fotplatens treghet kan enkelt justeres ved at de to festeskruene dras til eller løsnes. Du kan deretter låse mutteren med loctite. Se bilde.